

INTERACRYL COLD

Dentální pryskyřice polymerující za studena, bez kadmia, na bázi methylerakrylátu (polymer-prášek + monomer-tekutina).
Interacryl cold odpovídá mezinárodní normě ISO 1567.

Indikace:

- opravy totálních i parciálních náhrad
- rebase náhrad
- doplňování parciálních náhrad

Kontraindikace:

Není vhodná pro zhotovení totálních ani parciálních náhrad.

Složení akrylátu Interacryl cold umožňuje rychlou a stejnoměrnou polymeraci za studena.

Barva Interacrylu cold odpovídá ostatním barvám akrylátů dodávaných firmou Interdent.

Návod na použití:

Z náhrady fixované na sádrovém modelu odstraníme zbytky lepicího vosku, sádrový model nalozíme Izeakrylem. Opravenou část náhrady zdrsňme a zvlhčíme monomerní z Interacrylu cold.

Jednotlivé komponenty Interacrylu cold se míchají v následujících poměrech (při pokojové teplotě):

	prášek	tekutina
v ml (objemově)	2,5	1,0
v g (hmotnostně)	1,70	0,95

Prášek a tekutinu dobře promícháme cca 20 vteřin. Vzniklé bublinky ve směsi odstraníme vibracemi. Vzniklá řásta necháme chvíli uležet, aby dosáhlo žádané konzistence. Čas zpracování při pokojové teplotě je 5 minut.

Při opravách prováděných v polymeračním hrnci je čas polymerace 10 minut při tlaku 2,5 baru a teplotě vody 55 st. C.

Rekapitulace času:

čas míchání	20 vteřin
čas uležení	podle potřeby
čas zpracování (při pokojové teplotě)	5 minut
čas polymerace (voda cca 55 st. C)	10 minut

Když odstraníme sádku, polymerovaný objekt opracujeme rotačními brusnými nástroji a vyčistíme prostředky na loštění (pemza, Interdent, lešticí gumy, filce nebo kartáče).

Ktrastického náboje, nekříže při práci.

R11 Vysoce hořlavý.

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

S0 Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Základ kouření

S24 Zametez styku s kůží

S29 Nevylévejte do kanalizace

S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S37 Používejte vhodné ochranné rukavice

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Skladování:

- při pokojové teplotě od 18 do 22 st. C

- v tmavé, vzdušné místnosti

- z dosahu napovolaných osob a dětí